


GUIDE D'INSTALLATION **Adaptateur TV ConnectLine** **Démarrage rapide**

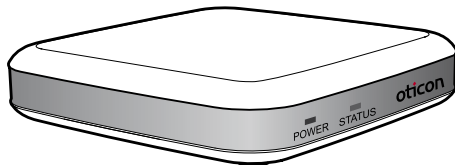

A LIRE EN PREMIER


Avant que vos aides auditives puissent être utilisées pour écouter la télévision, l'adaptateur TV doit être relié à la télévision et à une alimentation électrique.

Ceci est un guide simple étape par étape pour l'installation de l'adaptateur TV.

Tous les éléments nécessaires sont inclus dans ce package.


Les éléments sont répartis dans 3 boîtes numérotées de 1 à 3.

Les numéros font références aux étapes d'installation.

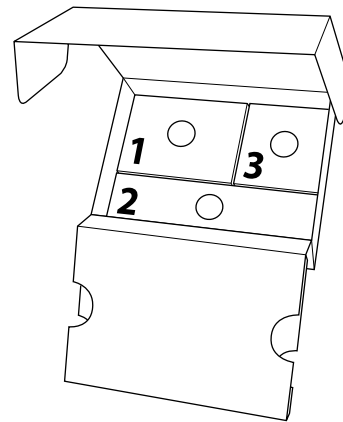

DESCRIPTION DE L'ADAPTATEUR TV

Arrière

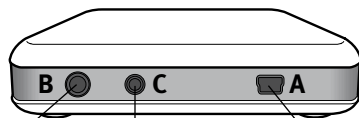


Connexion TV

Connexion
micro
(Non utilisée)

Connexion Alimentation

Avant

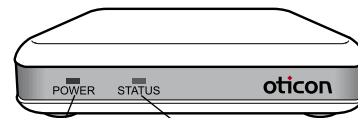

INDICATEUR D'ALIMENTATION

Lumière	Signification
Fixe	En fonction
Eteinte	Eteint

INDICATEUR DE STATUT



Lumière	Signification
Fixe	Streamer connecté et en fonction
Eteinte	En veille
Clignotement rapide	Appairage

ALIMENTATION

Démarrez en connectant l'adaptateur TV à l'alimentation électrique.

Utilisez l'adaptateur d'alimentation situé dans la boîte no. 1.


- Branchez l'alimentation dans une prise murale ou une autre source électrique.
- Branchez le cordon d'alimentation dans la connexion d'alimentation notée **A**.
- Vérifiez que l'alimentation est activée et que le voyant d'alimentation situé sur l'avant de l'adaptateur TV est allumé en vert.

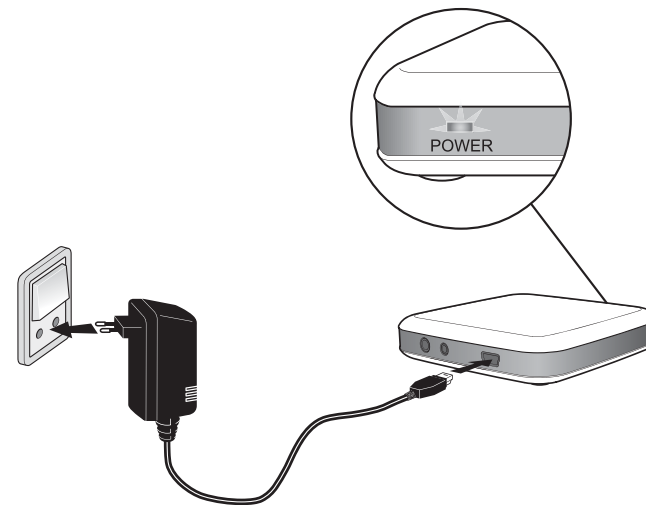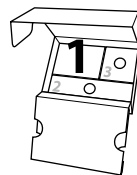

CONNEXION A LA TV

Connectez l'adaptateur TV à la télévision. Utilisez le cordon TV de la boîte no. **2**.

- Branchez la prise noire du cordon TV au connecteur marqué **B**.
- Branchez les prises rouges et blanches sur les sorties "AUDIO OUT" de la télévision. (Généralement marquées "L – R" "AUDIO OUT" et situées en général à l'arrière de la télévision ou sur le tableau inférieur).

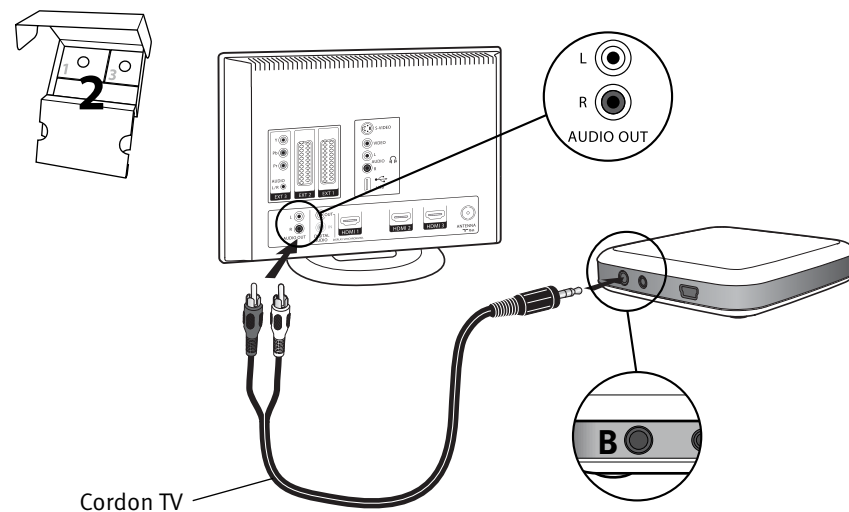





Si la télévision ne possède pas de sortie RCA Phono “L - R” “OUTPUT”, un adaptateur doit être utilisé pour brancher le cordon TV. Rendez-vous alors à la page suivante (sinon reportez-vous à la page 16 pour l’APPAIRAGE).

L'adaptateur se trouve dans la boîte no. **3**.

(Si l'installation s'est faite à la fin de l'étape 2, la boîte no. 3 n'est pas utile !)

CONNEXION PERITEL en utilisant l'adaptateur Péritel.

- Branchez le cordon TV sur les prises rouge et blanche de l'adaptateur Péritel et branchez-le à la connexion Péritel de la télévision.
- Si vous possédez un DVD ou un décodeur satellite branché sur la prise Péritel, vous devez utiliser l'option 2 à la place. (Connexion casque, page suivante).

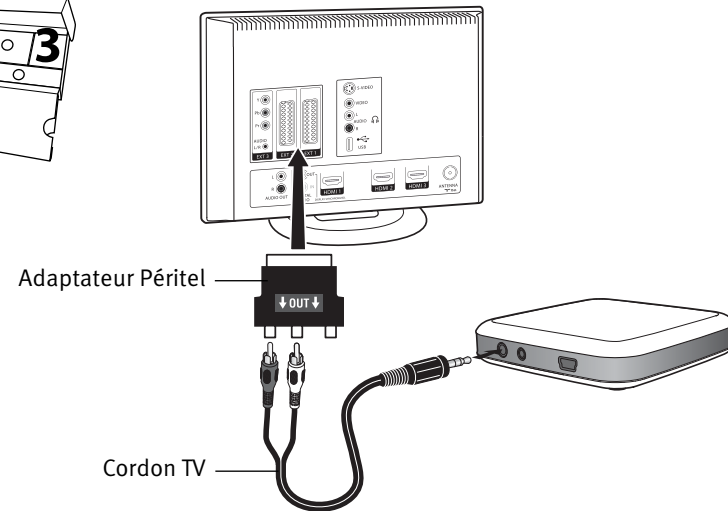
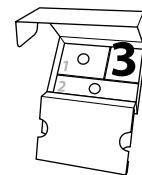


CONNEXION CASQUE en utilisant l'adaptateur Jack.

- Branchez le cordon TV à l'adaptateur jack et branchez-le dans la sortie casque de la télévision.

La prise casque se trouve généralement sur l'avant ou sur le côté de la télévision.

A noter: Les hauts parleurs de la télévision peuvent être désactivés lorsque l'on se branche à la sortie casque. Le son ne sortira que via l'adaptateur TV.

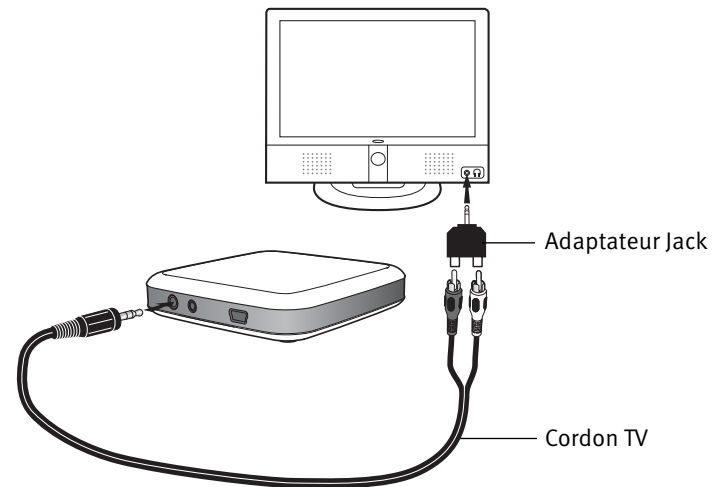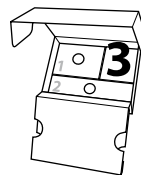

La toute première fois que le Streamer est utilisé avec l'adaptateur TV, les deux appareils doivent être appairés.

APPAIRAGE :

1. De manière à réaliser l'appairage, les deux appareils doivent être placés côte à côte. Placez le Streamer à côté de l'adaptateur TV (moins de 30 cm).

2. Appuyez sur le bouton de connexion du Streamer pendant 5 secondes jusqu'à ce que la lumière bleue clignote rapidement.




3. Les deux appareils établissent une connexion entre eux. Attendez une minute.

4. Après une minute, l'adaptateur TV est connecté au Streamer et l'appairage est effectif. L'indicateur de statut orange sur l'adaptateur TV s'allume.



L'appairage se fait une seule fois et il ne doit pas normalement être recommencé.

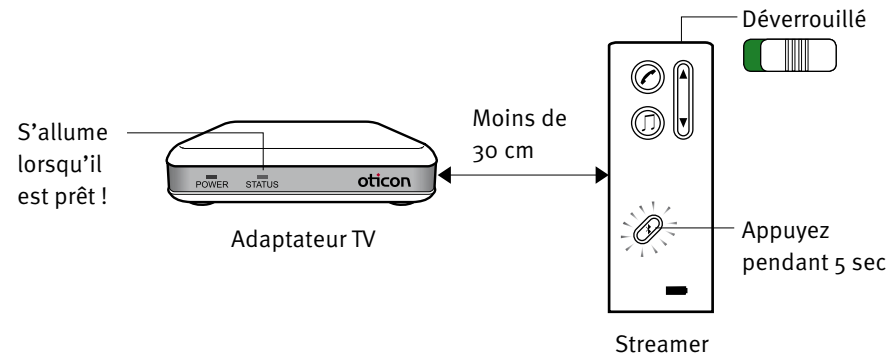

Placez l'adaptateur TV dans un endroit proche de votre télévision. Pour l'utilisation du Streamer avec l'adaptateur TV, reportez-vous au guide de l'utilisateur.

Eteindre l'adaptateur TV

En utilisation normale, l'adaptateur TV n'utilise que très peu d'énergie et il n'est pas nécessaire de l'éteindre.

Portée de l'adaptateur TV

L'adaptateur TV a une portée de 10 mètres en fonction du mobilier et de son placement.

Connexion avec l'adaptateur Péritel

Si vous connectez l'adaptateur TV avec l'adaptateur Péritel, vous ne pourrez percevoir uniquement que le son en provenance du tuner de la TV. Le son en provenance d'autres sources comme les DVD ou magnétoscopes ne seront pas audibles dans les appareils auditifs. Il s'agit d'une limitation de connexion Péritel.

Pour plus de conseils et d'aides, vous pouvez visiter le site d'information ConnectLine à l'adresse www.oticon.fr/connectline

PRECAUTIONS MARQUAGE ET VALIDATION DU PRODUIT

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC.

L'utilisation est soumise aux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit produire aucune interférence nocive, et (2) l'appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Tout changement apporté à l'équipement qui ne serait pas expressément approuvé par Oticon peut annuler l'autorisation d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.

Pour répondre aux normes d'exposition FCC RF, l'appareil et son antenne doivent être installés à une distance minimum de 20 cm des personnes. Tout autre mode opératoire doit être évité.

REMARQUE: *L'équipement a été testé et est certifié conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B en vertu de la partie 15 des règlements du FCC. Ces limites ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. L'équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, il peut être à l'origine de parasites pour les communications hertziennes. Néanmoins, il n'existe aucune garantie quant à l'absence totale d'interférences dans une installation donnée.*

En cas d'interférences avec une réception radio ou TV, qui peut être déterminée en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à appliquer les mesures suivantes:

- Réorienter ou changer l'emplacement de l'antenne de réception.*
- Éloigner l'équipement du récepteur.*
- Brancher l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur.*
- Prendre contact avec le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.*

Oticon certifie par la présente que l'adaptateur TV 75-01 est en accord avec les exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante :

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.com

Utilisez l'adaptateur d'alimentation suivante avec votre adaptateur TV : Fuhua, Model No. UE10W-050020SPC Input : 100-240V AC 150mA 50-60Hz, Output : 5V DC 200mA

CE 0678



Les déchets électroniques doivent être traités selon les réglementations locales.

AVERTISSEMENTS

L'adaptateur TV n'est pas un jouet et doit donc être tenu hors de portée des enfants et de toute autre personne susceptible d'avaler des pièces ou de se blesser à leur contact. Une attention toute particulière doit être accordée aux petites pièces afin d'éviter que les enfants ne s'étranglent en les avalant.

En cas d'ingestion d'une pièce, consultez immédiatement un médecin.

La sécurité d'utilisation de l'adaptateur TV avec le câble de raccordement auxiliaire dépend de la source du signal externe. Lorsque le câble est raccordé à un équipement alimenté sur secteur, ce dernier doit être conforme aux normes CEI 60065, CEI 60601 ou autres normes de sécurité équivalentes.

L'adaptateur TV est conçu pour répondre aux normes les plus rigoureuses en matière de compatibilité électromagnétique. Toutefois, l'adaptateur TV peut produire des interférences avec d'autres appareils médicaux. Veuillez contacter une personne qualifiée pour obtenir la permission d'utilisation de l'adaptateur TV dans un hôpital ou un lieu similaire.

