

GUIDE D'INSTALLATION **Adaptateur Téléphonique ConnectLine** **Démarrage rapide**






A LIRE EN PREMIER

Avant que vos aides auditives puissent être utilisées pour les conversations téléphoniques sur votre ligne fixe, l'adaptateur téléphonique doit être relié au téléphone et à une alimentation électrique.

Ceci est un guide simple étape par étape pour l'installation de l'adaptateur téléphonique.

Tous les éléments nécessaires sont inclus dans ce package. Les éléments sont répartis dans deux boîtes numérotées.

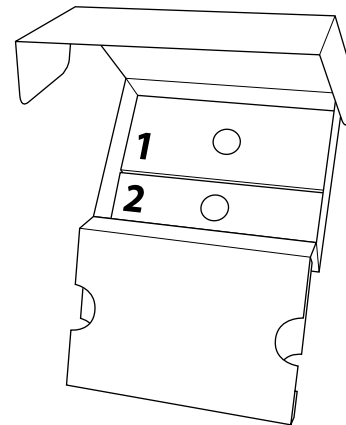

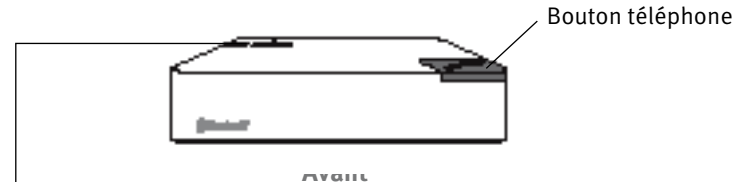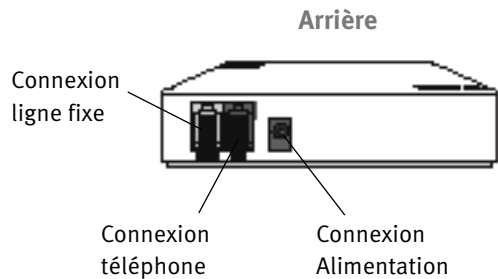

INDICATEUR DE STATUT

Lumière	Signification
Fixe	Streamer connecté
Clignotement lent	Recherche du Streamer
Clignotement rapide	Appairage
Eteinte	Off


ALIMENTATION

Démarrez l'installation en connectant l'adaptateur téléphonique à l'alimentation électrique.

Utilisez l'adaptateur d'alimentation situé dans la boîte no. 1.

- Branchez l'alimentation dans une prise murale ou une autre source électrique.
- Branchez le cordon d'alimentation dans la connexion d'alimentation.
- Vérifiez que l'alimentation est activée.

Après un court instant, l'indicateur de statut commence à clignoter lentement en rouge.

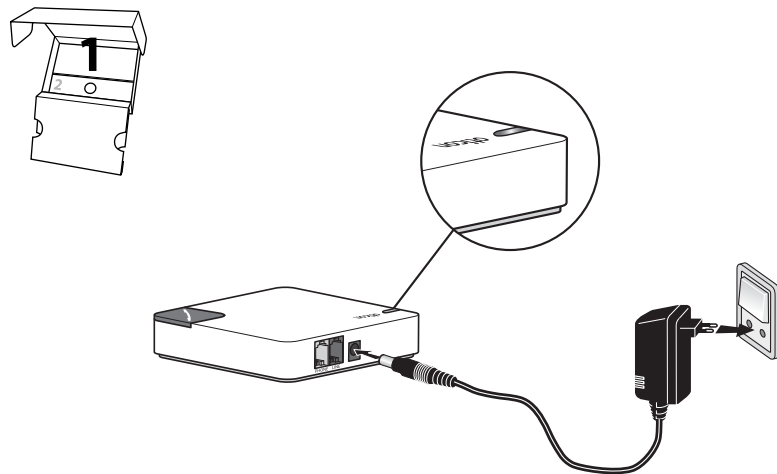

LIAISON AVEC LA LIGNE TELEPHONIQUE



Connectez l'adaptateur téléphonique au téléphone et à la ligne téléphonique. Utilisez le cordon téléphone de la boîte no. **2**.

(La prise de connexion est identique aux deux extrémités de ce cordon)

Tout d'abord, la connexion existante entre la prise murale et votre téléphone (ou la base) doit être débranchée du côté du téléphone :

- 1.** Débranchez la ligne du téléphone (ou de la base). *
- 2.** Branchez la ligne du téléphone sur l'adaptateur téléphonique au connecteur "LINE" (NOIR).
- 3.** Branchez le cordon téléphonique sur l'adaptateur téléphonique au connecteur "PHONE" (JAUNE).
- 4.** Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique sur le téléphone (ou sur la base).*
L'installation est désormais terminée. Avant l'utilisation, le Streamer et l'adaptateur téléphonique doivent être appairés. (Reportez-vous à la page suivante, préparer le Streamer).

**Si votre téléphone principal ou la base ne possède pas de cordon détachable, vous devez, soit utiliser un autre téléphone, soit faire appel à un technicien pour terminer l'installation.*

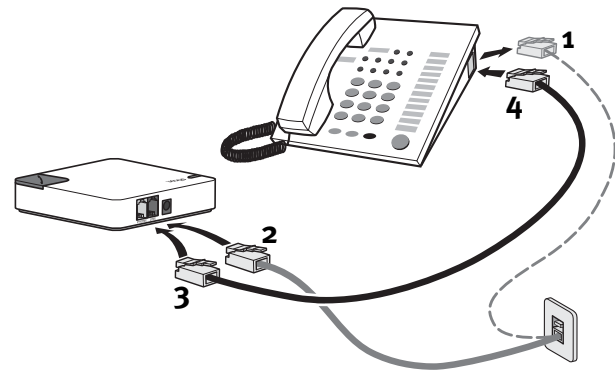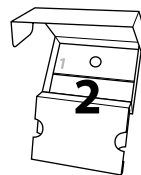

La toute première fois que le Streamer est utilisé avec l'adaptateur téléphonique, les deux appareils doivent être appairés.

APPAIRAGE :

1. De manière à préparer l'adaptateur téléphonique et le Streamer, les deux appareils doivent être placés côte à côte et le mode appairage doit être activé.
2. Appuyez sur le bouton de connexion du Streamer pendant 5 secondes jusqu'à ce que la lumière bleue clignote rapidement.
3. Appuyez sur le bouton téléphone rouge sur l'adaptateur téléphonique pendant 5 secondes jusqu'à ce que la lumière rouge clignote.
4. Dans la minute qui suit, l'adaptateur téléphonique se connecte au Streamer et l'appairage est effectif.
 - L'indicateur de statut rouge sur l'adaptateur téléphonique passe en rouge fixe.
 - La lumière bleue du bouton de connexion du Streamer s'allume pendant 5 secondes et se met à clignoter très lentement.



L'appairage se fait une seule fois et il ne doit pas normalement être recommencé.

Placez l'adaptateur téléphonique dans un endroit proche de votre téléphone fixe ou de la base du téléphone sans fil.

Pour l'utilisation du téléphone fixe avec l'adaptateur téléphonique et le Streamer, reportez-vous au guide de l'utilisateur.

Eteindre l'adaptateur téléphonique

Si vous ne désirez pas recevoir d'appels au travers de votre Streamer, éteignez l'adaptateur téléphonique en débranchant son alimentation.

En utilisation normale, l'adaptateur téléphonique n'utilise que très peu d'énergie et il n'est pas nécessaire de l'éteindre.

Portée de l'adaptateur téléphonique

L'adaptateur téléphonique a une portée de 10 mètres en fonction du mobilier et de son placement. A l'intérieur de cette zone, vous pouvez passer des appels téléphoniques en mode mains libres avec le Streamer.

Pour plus de conseils et d'aide, vous pouvez visiter le site d'information ConnectLine à l'adresse www.oticon.fr/connectline

PRECAUTIONS MARQUAGE ET VALIDATION DU PRODUIT

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC.

L'utilisation est soumise aux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit produire aucune interférence nocive, et (2) l'appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Tout changement apporté à l'équipement qui ne serait pas expressément approuvé par Oticon peut annuler l'autorisation d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.

Pour répondre aux normes d'exposition FCC RF, l'appareil et son antenne doivent être installés à une distance minimum de 20 cm des personnes. Tout autre mode opératoire doit être évité.

REMARQUE : *L'équipement a été testé et est certifié conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B en vertu de la partie 15 des règlements du FCC. Ces limites ont été conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. L'équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, il peut être à l'origine de parasites pour les communications hertziennes. Néanmoins, il n'existe aucune garantie quant à l'absence totale d'interférences dans une installation donnée.*

En cas d'interférences avec une réception radio ou TV, qui peut être déterminée en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à appliquer les mesures suivantes:

- Réorienter ou changer l'emplacement de l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Prendre contact avec le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Oticon certifie par la présente que l'adaptateur téléphonique est en accord avec les exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante :

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.com

CE



Les déchets électroniques doivent être traités selon les réglementations locales.

Utilisez l'adaptateur d'alimentation suivante avec votre adaptateur téléphonique : Fuhua, Model No. UE10W-050020SPC Input : 100-240V AC 150mA 50-60Hz, Output: 5V DC 200mA

AVERTISSEMENTS

L'adaptateur téléphonique n'est pas un jouet et doit donc être tenu hors de portée des enfants et de toute autre personne susceptible d'avaler des pièces ou de se blesser à leur contact. Une attention toute particulière doit être accordée aux petites pièces afin d'éviter que les enfants ne s'étranglent en les avalant.

En cas d'ingestion d'une pièce, consultez immédiatement un médecin.

La sécurité d'utilisation de l'adaptateur téléphonique avec le câble de raccordement auxiliaire dépend de la source du signal externe. Lorsque le câble est raccordé à un équipement alimenté sur secteur, ce dernier doit être conforme aux normes CEI 60065, CEI 60601 ou autres normes de sécurité équivalentes.

L'adaptateur téléphonique est conçu pour répondre aux normes les plus rigoureuses en matière de compatibilité électromagnétique. Toutefois, l'adaptateur téléphonique peut produire des interférences avec d'autres appareils médicaux. Veuillez contacter une personne qualifiée pour obtenir la permission d'utilisation de l'adaptateur téléphonique dans un hôpital ou un lieu similaire.

